



EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Concentrate

Désinfectant de surfaces concentré sans alcool

- Préparation sans aldéhyde ultra-nettoyante
- Sans parfum
- Convient à l'utilisation dans le domaine alimentaire



DESCRIPTION DU PRODUIT :

EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Concentrate est une préparation combinée pour la désinfection et le nettoyage de l'inventaire médical, des dispositifs médicaux et des surfaces en tout genre. EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Concentrate est à base de composés d'ammonium quaternaire. Ce produit est sans parfum, ne contient ni aldéhyde ni phénols et est un puissant nettoyant. EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Concentrate convient parfaitement à la désinfection de surfaces lavables non poreuses de l'industrie de transformation alimentaire et des cuisines industrielles. Il convient parfaitement pour les domaines où il faut à la fois satisfaire à des exigences hygiéniques élevées et éviter les odeurs désagréables. EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Concentrate offre une excellente compatibilité des matériaux et convient également à une utilisation sur plexiglas.

CHAMPS D'APPLICATION :

Selon directive dispositifs médicaux (DDM): Pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux non invasifs.

Selon le règlement sur les produits biocides (RPB): Pour le nettoyage et la désinfection de toutes types de surfaces.

SPECTRE D'ACTION :

Bactéricide (incl. SARM), levuricide, désactivant viral (VHB/VIH/VHC/VDVB/virus de la vaccine/papovavirus): 2,5 % (25g/l) – 15 min.; 2 % (20g/l) – 30 min.; 1 % (10g/l) – 60 min.

CONCENTRATION :

	1,0 %	2,0 %	2,5 %
1 L*	10 ml	20 ml	25 ml
2 L*	20 ml	40 ml	50 ml
4 L*	40 ml	80 ml	100 ml
8 L*	80 ml	160 ml	200 ml
10 L*	100 ml	200 ml	250 ml

UTILISATION :

Asperger généreusement la surface à désinfecter avec la solution active EuroSept®Plus Surface Disinfection non-alcoholic Concentrate fraîchement préparée, la répartir mécaniquement et laisser sécher (désinfection par frottement et essuyage). Dans le cadre d'une utilisation régulière, les surfaces à désinfecter peuvent être de nouveau utilisées dès qu'elles sont sèches.

COMPOSITION :

100 g contiennent : 6,66 g de chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzylammonium; 3,33 g de chlorure de didécyldiméthylammonium; < 5 % agents de surface non ioniques, parfums.



EuroSept® Plus Surface Disinfection non-alcoholic Concentrate


Désinfectant de surfaces concentré sans alcool

- Préparation sans aldéhyde ultra-nettoyante
- Sans parfum
- Convient à l'utilisation dans le domaine alimentaire



REMARQUE PARTICULIÈRE :

Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C12-16 benzyldiméthyles, chlorures; ethoxylate d'alcool gras; chlorure de didécyldiméthylammonium. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et l'emballage dans un centre agréé pour l'élimination des déchets ou dans les collecteurs municipaux.

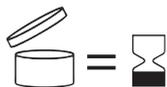

LISTES / STATUT DU PRODUIT :

- Enregistré comme produit biocide **auprès du BauA (Institut fédéral de sécurité et de santé au travail) conformément à la loi sur les biocides : N° BAuA Reg. :**
- Conforme à la directive UE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

FORMES PHARMACEUTIQUES :

- REF **988-2674** Bouteille doseuse de 1 l
- REF **988-2675** Bidon de 5 l

ACCESSOIRES :

- REF **979-6276** Robinet de remplissage de bidon
- REF **979-6278** Clé de serrage pour bidon
- REF **979-6272** Pompe doseuse pour bidon de 5 l