



EuroSept®Plus Wet Wipes Surface One Step & Pop Up Sensitive

Lingettes désinfectantes non tissées, prêtes à l'emploi

- **Aucun système de distribution supplémentaire requis, manipulation facile**
- Utilisation simple, rapide et précise
- Convient à toutes les zones sensibles du point de vue de l'hygiène et dans l'environnement du patient
- Efficace contre tous les virus enveloppés ainsi que les rotavirus et norovirus

NOUVEAU

Français



DESCRIPTION DU PRODUIT :

EuroSept®Plus System Wet Wipes sont des lingettes prêtes à l'emploi, imprégnées de solution désinfectante alcoolique pour la désinfection de dispositifs médicaux non invasifs et pour les surfaces dans les zones sensibles du point de vue de l'hygiène et dans l'environnement du patient. Il n'est pas nécessaire d'essuyer la surface après utilisation de EuroSept®Plus System Wet Wipes. Ne laisse aucun résidu sur la surface.

CHAMPS D'APPLICATION :

Selon directive dispositifs médicaux (DDM): désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs résistants à l'alcool. Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB): désinfection rapide et nettoyage de surfaces de tous types résistants à l'alcool.

MODE D'EMPLOI :

Essuyer les surfaces avec EuroSept®Plus System Wet Wipes. Veiller à asperger généreusement toute la surface de produit et à respecter le temps d'action. Ne pas utiliser sur le verre acrylique (PMMA).

COMPOSITION :

100 g de solution prête à l'emploi contiennent :
45 g d'éthanol (CAS: 64-17-5).

SPECTRE ET TEMPS D'ACTION :

Désinfection des surfaces (désinfection par essuyage), bactéricide, levuricide selon VAH : 1 min.; tuberculocide (M.terrae) : 1 min. ; virucide limité (inclus VHB, VIH, VHC), rotavirus : 30 s. ; norovirus (MNV) : 1 min.

REMARQUE PARTICULIÈRE :

Attention : Matière solide inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et l'emballage dans un centre agréé pour l'élimination des déchets ou dans les collecteurs municipaux. Le type d'utilisateurs : professionnelle/grand public.

DURABILITE:

One Step: peut être conservé jusqu'à 42 jours après ouverture

Pop Up: peut être conservé jusqu'à 3 mois après ouverture



EuroSept® Plus Wet Wipes Surface One Step & Pop Up Sensitive

Lingettes désinfectantes non tissées,
prêtes à l'emploi

- **Aucun système de distribution supplémentaire requis, manipulation facile**
- Utilisation simple, rapide et précise
- Convient à toutes les zones sensibles du point de vue de l'hygiène et dans l'environnement du patient
- Efficace contre tous les virus enveloppés ainsi que les rotavirus et norovirus

NOUVEAU

Français



LISTES / STATUT DU PRODUIT :

- Enregistré comme produit biocide auprès du Sinbad conformément à la loi sur les biocides : N° Reg. : One Step 58460 & Pop Up Sensitive 58461
- Conforme à la directive UE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

FORMES PHARMACEUTIQUES :

- | | |
|---------------------|---|
| REF 988-3770 | Eurosept® Plus One Step Wet Wipes Surface
17,5 x 36cm, 120 lingettes |
| REF 988-3771 | Eurosept® Plus Wet Wipes Surface Pop Up Sensitive
22 x 20 cm, 80 lingettes |