



# EuroSept®Plus Disinfection Wipes XL non-alcoholic Lingettes désinfectantes à action rapide sans alcool

- Lingettes sans alcool pour la désinfection rapide de grande surfaces
- A action rapide et préservant les matériaux
- Pratiques à utiliser



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Lingettes désinfectantes sans alcool prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide et le nettoyage de l'inventaire médical et des surfaces en tout genre, dans tous les domaines de la transformation alimentaires et des cuisines industrielles ainsi que pour le secteur médical. À base de composés d'ammonium quaternaire EuroSept®Plus Disinfection Wipes XL non-alcoholic sont sans alcool et ne contiennent ni aldéhyde ni phénols. Grâce à la qualité supérieure du matériau qui ne peluche pas, la restitution garantie du produit actif et leur efficacité de nettoyage, les EuroSept®Plus Disinfection Wipes XL non-alcoholic conviennent tout particulièrement à une utilisation professionnelle.

## CHAMPS D'APPLICATION :

Selon directive dispositifs médicaux (DDM): Convient à la désinfection et au nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs sensibles à l'alcool.

Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB): Convient à la désinfection et au nettoyage de tout type de surface sensible à l'alcool.

## SPECTRE ET TEMPS D'ACTION :

Désinfection de surfaces (désinfection par essuyage), bactéricide, levuricide selon VAH: 1 min., efficace contre tous les virus enveloppés incl. VHB/VIH/VHC/virus de la vaccine/virus de la grippe selon la recommandation RKI : 30 sec.

## MODE D'EMPLOI :

Humidifier intégralement les surfaces et les objets. Essuyer le cas échéant avec une lingette à usage unique à l'issue du temps d'action.

## COMPOSITION :

100 g de liquide d'imprégnation contiennent : 0,5 g de chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzylammonium; 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium.

## REMARQUE PARTICULIÈRE :

Ouvrir la recharge. Former un rouleau à partir de l'emballage ouvert. Faire glisser le contenu ainsi que le sachet directement dans le distributeur. Tirer au centre du rouleau la première lingette via l'ouverture dans le couvercle du distributeur et remettre le couvercle en place. Veiller à remplir le distributeur uniquement avec des recharges de Lingettes désinfectantes à action rapide sans aldéhyde. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et l'emballage dans un centre agréé pour l'élimination des déchets ou dans les collecteurs municipaux.





# EuroSept® Plus Disinfection Wipes XL non-alcoholic

## Lingettes désinfectantes à action rapide sans alcool

- Lingettes sans alcool pour la désinfection rapide de grande surfaces
- A action rapide et préservant les matériaux
- Pratiques à utiliser



### LISTES / STATUT DU PRODUIT :

- Enregistré comme produit biocide **auprès du BauA (Institut fédéral de sécurité et de santé au travail) conformément à la loi sur les biocides : N° BAuA Reg. :**
- Conforme à la directive UE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

### FORMES PHARMACEUTIQUES :

REF <b>988-2654</b>	200 unités par recharge 22x20cm
REF <b>988-2658</b>	200 unités par boîte 22x20cm