



EuroSept® Plus System Dispenser Wipes

- Distributeur de lingettes
- Lingettes désinfectantes non tissées
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes sans alcool



• Distributeur de lingettes

DESCRIPTION DU PRODUIT :

A remplir avec les lingettes et le produit désinfectant/détergent.

IMPORTANT :

Avant un nouveau remplissage, le distributeur ainsi que le couvercle doivent être nettoyés et désinfectés à l'aide de produits désinfectants adaptés. Lors du remplissage, il est recommandé d'inscrire sur l'étiquette la nature du liquide d'imprégnation, sa concentration d'utilisation, ainsi que la date du remplissage.

DURÉE D'UTILISATION :

28 jours

SMALL :

REF 988-2659 **S** Eurosept Plus System Dispenser small for size 25x25cm

Mode d'emploi : ouvrir le couvercle du distributeur, insérer le rouleau de lingettes et l'imprégner avec 1,5 litres de solution détergente/désinfectante prête à l'emploi. Laisser agir pendant 30 minutes avant d'utiliser les lingettes. Toujours refermer le couvercle après utilisation.

LARGE :

REF 988-2660 **L** Eurosept Plus System Dispenser large for size 32x30cm

Mode d'emploi : ouvrir le couvercle du distributeur, insérer le rouleau de lingettes et l'imprégner avec 2,5 litres de solution détergente/désinfectante prête à l'emploi. Laisser agir pendant 30 minutes avant d'utiliser les lingettes. Toujours refermer le couvercle après utilisation.

• Lingettes désinfectantes non tissées

FORMES PHARMACEUTIQUES :

REF 988-2661 **S** Eurosept Plus System Dry Wipes small 25x25cm - 3x70

REF 988-2662 **L** Eurosept Plus System Dry Wipes large 32x30cm - 6x90

REF 988-2663 **S** Eurosept Plus System Dry Wipes reinforced 24x25cm - 6x120



EuroSept®Plus System Dispenser Wipes

- Distributeur de lingettes
- Lingettes désinfectantes non tissées
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes sans alcool



• System Wet Wipes

- Utilisation simple, rapide et précise
- Convient à toutes les zones sensibles du point de vue de l'hygiène et dans l'environnement du patient
- Efficace contre tous les virus enveloppés ainsi que les rotavirus et norovirus

DESCRIPTION DU PRODUIT :

EuroSept®Plus System Wet Wipes sont des lingettes prêtes à l'emploi, imprégnées de solution désinfectante alcoolique pour la désinfection de dispositifs médicaux non invasifs et pour les surfaces dans les zones sensibles du point de vue de l'hygiène et dans l'environnement du patient. Il n'est pas nécessaire d'essuyer la surface après utilisation de EuroSept®Plus System Wet Wipes.

CHAMPS D'APPLICATION :

Selon directive dispositifs médicaux (DDM): désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs résistants à l'alcool.

Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB): désinfection rapide et nettoyage de surfaces de tous types résistants à l'alcool.

SPECTRE ET TEMPS D'ACTION :

Désinfection des surfaces (désinfection par essuyage), bactéricide, levuricide selon VAH : 1 min. ; tuberculocide (M.terrae) : 1 min. ; virucide limité (inclus VHB, VIH, VHC), rotavirus : 30 s. ; norovirus (MNV) : 1min.

MODE D'EMPLOI :

Essuyer les surfaces avec EuroSept®Plus System Wet Wipes. Veiller à asperger généreusement toute la surface de produit et à respecter le temps d'action. Ouvrez la recharge. Formez un rouleau avec le paquet ouvert. Placez le contenu avec le sachet dans le distributeur. Tirez la première lingette au centre du rouleau de manière à la faire passer par l'ouverture du couvercle du distributeur et remplacez le couvercle sur la boîte. Veuillez remplir la boîte uniquement avec une recharge EuroSept®Plus System Wet Wipes.

COMPOSITION :

100 g de solution prête à l'emploi contiennent : 45 g d'éthanol (CAS: 64-17-5).



EuroSept® Plus System Dispenser Wipes

- Distributeur de lingettes
- Lingettes désinfectantes non tissées
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes sans alcool



REMARQUE PARTICULIÈRE :

Ouvrir la recharge. Faire glisser le contenu ainsi que le sachet directement dans le distributeur. Tirer au centre du rouleau la première lingette via l'ouverture dans le couvercle du distributeur et remettre le couvercle en place. Veiller à remplir le distributeur uniquement avec des recharges de lingettes désinfectantes à action rapide.

Attention : Matière solide inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et l'emballage dans un centre agréé pour l'élimination des déchets ou dans les collecteurs municipaux. Le type d'utilisateurs : professionnelle/grand public.



LISTES / STATUT DU PRODUIT :

- Enregistré comme produit biocide **auprès du BauA (Institut fédéral de sécurité et de santé au travail) conformément à la loi sur les biocides : N° BAuA Reg. :**
- Conforme à la directive UE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

FORMES PHARMACEUTIQUES :

- REF **988-0888** **S** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface 25x25cm
- REF **988-2644** **L** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface 32x30cm

• System Wet Wipes sans alcool

- Lingettes sans alcool pour la désinfection rapide de grandes surfaces à action rapide
- Préservant les matériaux
- Pratiques à utiliser

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Lingettes désinfectantes sans alcool prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide et le nettoyage de l'inventaire médical et des surfaces en tout genre, dans tous les domaines de la transformation alimentaires et des cuisines industrielles ainsi que pour le secteur médical. À base de composés d'ammonium quaternaire EuroSept® Plus System Wet Wipes non-alcoholic sont sans alcool et ne contiennent ni aldéhyde ni phénols. Grâce à la qualité supérieure du matériau qui ne peluche pas, la restitution garantie du produit actif et leur efficacité de nettoyage, les EuroSept® Plus System Wet Wipes non-alcoholic conviennent tout particulièrement à une utilisation professionnelle.



EuroSept® Plus System Dispenser Wipes

- Distributeur de lingettes
- Lingettes désinfectantes non tissées
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes sans alcool



CHAMPS D'APPLICATION :

Selon directive dispositifs médicaux (DDM): Convient à la désinfection et au nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs sensibles à l'alcool.

Selon le Règlement sur les produits biocides (RPB): Convient à la désinfection et au nettoyage de tout type de surface sensible à l'alcool.

SPECTRE ET TEMPS D'ACTION :

Désinfection de surfaces (désinfection par essuyage), bactéricide, levuricide selon VAH: 1 min., efficace contre tous les virus enveloppés incl. VHB/VIH/VHC/virus de la vaccine/virus de la grippe selon la recommandation RKI : 30 sec.

MODE D'EMPLOI :

Humidifier intégralement les surfaces et les objets. Essuyer le cas échéant avec une lingette à usage unique à l'issue du temps d'action.

COMPOSITION :

100 g de liquide d'imprégnation contiennent : 0,5 g de chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzylammonium; 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium.

LISTES / STATUT DU PRODUIT :

- Enregistré comme produit biocide auprès du BauA (Institut fédéral de sécurité et de santé au travail) conformément à la loi sur les biocides : N° BAuA Reg. :
- Conforme à la directive UE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

REMARQUE PARTICULIÈRE :

Ouvrir la recharge. Former un rouleau à partir de l'emballage ouvert. Faire glisser le contenu ainsi que le sachet directement dans le distributeur. Tirer au centre du rouleau la première lingette via l'ouverture dans le couvercle du distributeur et remettre le couvercle en place. Veiller à remplir le distributeur uniquement avec des recharges de Lingettes désinfectantes à action rapide sans aldéhyde. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et l'emballage dans un centre agréé pour l'élimination des déchets ou dans les collecteurs municipaux.



FORMES PHARMACEUTIQUES :

- REF 988-2657 **S** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface non-alcoholic 25x25cm
- REF 988-2665 **L** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface non-alcoholic 32x30cm