

## Guide Étape par étape

### Comment fabriquer une prothèse dentaire imprimée ?

■ Après avoir retiré la base rose et les segments des dents du plateau d'impression et avoir finalisé le processus de nettoyage (voir le nettoyage et la post-polymérisation dans la notice d'utilisation du matériau - IFU), laissez la prothèse dans son état actuel (vert - non polymérisé) et enlevez les supports.

■ Vous êtes maintenant prêt à coller les segments de dents à la résine rose. Ne pas polymériser la base ou les dents avant l'étape de collage.

1 Vérifiez que l'ajustage des segments de dents s'adapte dans son alvéole. Un petit espace entre les dents et la base est prévu pour le collage. Ensuite enlevez les dents.


2 Une petite quantité de résine liquide de la même teinte fera office d'adhésif. Appliquez la résine dans les alvéoles dentaires à l'aide d'un petit pinceau ou d'un applicateur seringue.

3 Placez le segment de dents dans les alvéoles et appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Essayez ensuite l'excédent de matériau avec une serviette en papier ou une serviette.

4 Utilisez une petite brosse à tête plate pour éliminer tout excès de matériau sur les dents et la jonction des gencives.

5 Une lumière bleue pendant quelques secondes maintiendra le segment en place, nous recommandons l'utilisation de la lampe HiLite pre 2.

6 Répétez l'opération avec les autres segments.

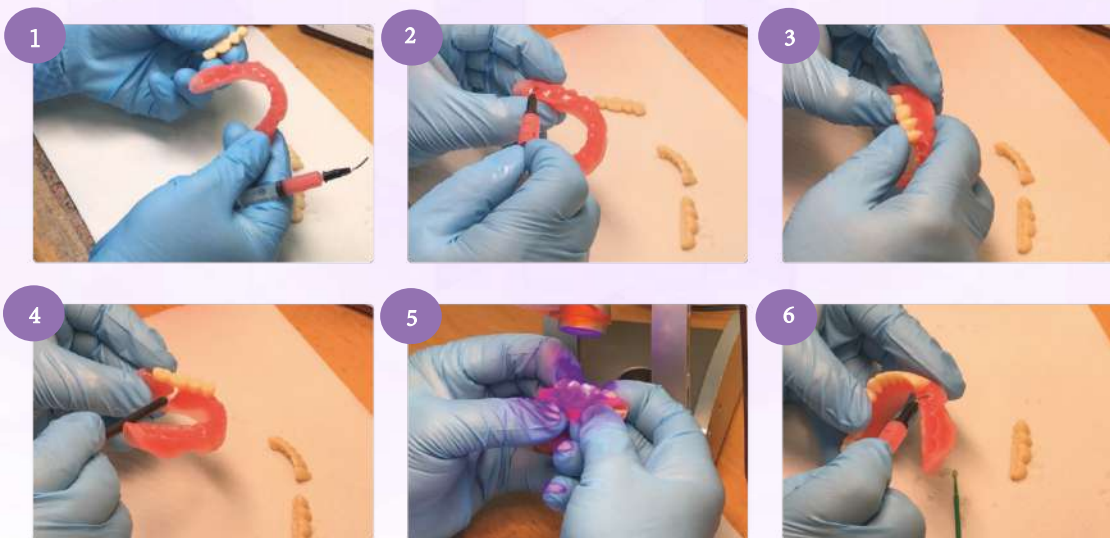

### Post-polymérisation de l'objet combiné

■ Après l'assemblage, effectuez la post-polymérisation de la prothèse entièrement imprimée (base et dents combinées) dans une enceinte de polymérisation adaptée, conformément à la notice d'utilisation du matériau (IFU).

### Finition

■ Après la post-polymérisation, lissez toutes les marques de support et les bords pour garantir le confort et un bon ajustement.

■ Poncer et polir la prothèse avec l'unité de polissage en utilisant la pierre ponce souhaitée pour éliminer les irrégularités de surface et obtenir une finition lisse.

■ Pour un brillant maximal, appliquez Pala Polish, recommandé pour les prothèses imprimées.